

GUÍA LIBRERÍA

MASTER

LIBRARY

C
A
D
-
C
A
M

ÍNDICE

	PÁG.
1. INTRODUCCIÓN	3
2. DESCARGA E INSTALACIÓN	4
3. FLUJO DE SELECCIÓN EN EXOCAD	10
4. TABLA DE COMPATIBILIDADES	11

1. INTRODUCCIÓN

1.1 NUEVAS LIBRERÍAS MASTER

Las **nuevas librerías MASTER** ofrecen un flujo de trabajo más flexible: **escanee con cualquier scanbody** compatible y **diseñe** con GT-Medical **MASTER**.



*PD/ DESS/ SIS/ Medentika/ Archimedes...

1.2 CARACTERÍSTICAS NUEVA LIBRERIA

<p style="text-align: center;">MULTI-PLATAFORMA</p> <p>Disponible para más 50 plataformas y marcas distintas</p>	<p style="text-align: center;">TIPO TRABAJO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Directo a implante • Sobre transepitelial • Ti-Base Prime <div style="display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <div style="border-left: 1px solid #ccc; height: 40px; margin-right: 5px;"></div> <div style="text-align: left;"> <p>Canales rectos y angulados</p> </div> </div>
<p style="text-align: center;">DESCARGA LIBRERÍAS</p> <p>A través de nuestra web www.gt-medical.com</p>	<p style="text-align: center;">VERSIÓN EXOCAD</p> <p>Disponible para todas las versiones de exocad.</p>

ACTUALIZA YA TU LIBRERÍA


para **beneficiarte** de estas **nuevas funcionalidades**

2. DESCARGA E INSTALACION DE LIBRERÍAS

2.1 LIBRERÍA COMPLETA

2.1.1 DESCARGA

1. Clicar en la barra de menú → CAD-CAM

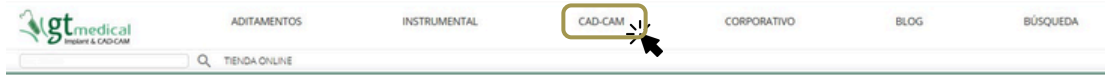


2. Clicar en el icono de "exocad" y se descargará un archivo ".zip"




3. Extraer la carpeta de la librería descargada ".zip" - botón dcho. - "Extraer todo.."

Nombre

Master_Library_Exocad

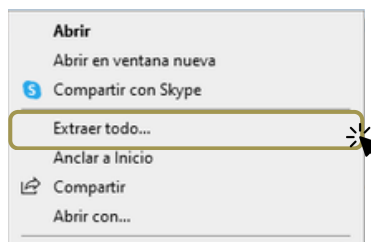

4. Seleccionar un lugar **temporal** para guardar la librería completa. (recomendación: Escritorio)

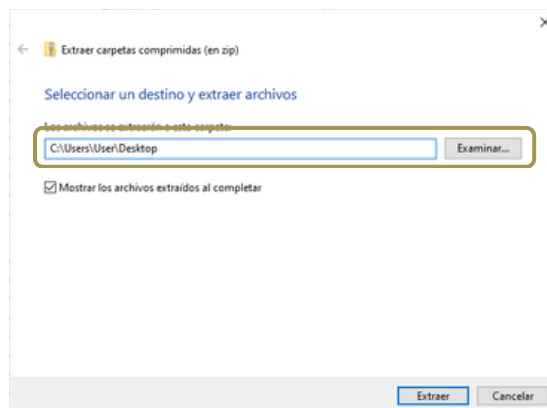


2. DESCARGA E INSTALACION DE LIBRERÍAS


2.1 LIBRERÍA COMPLETA

2.1.2 INSTALACIÓN


1. Seleccionar la carpeta "Tibase_prime_Exocad"

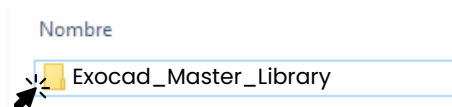


2. Seleccionar tipo de "Offset" o tolerancia

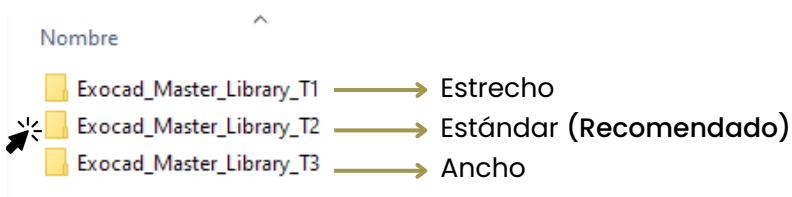

3. Seleccionar la Marca de Implante

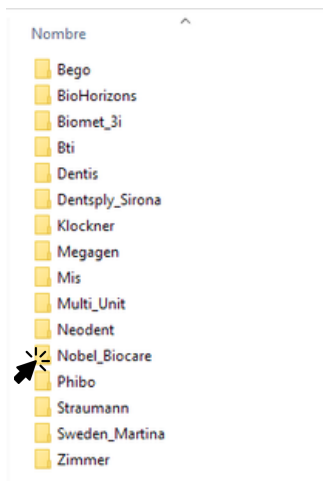

4. Copiar la(s) carpeta(s) del "Tipo de plataforma", siguiendo la tabla de correspondencia que aparece en la última página (pag.11).

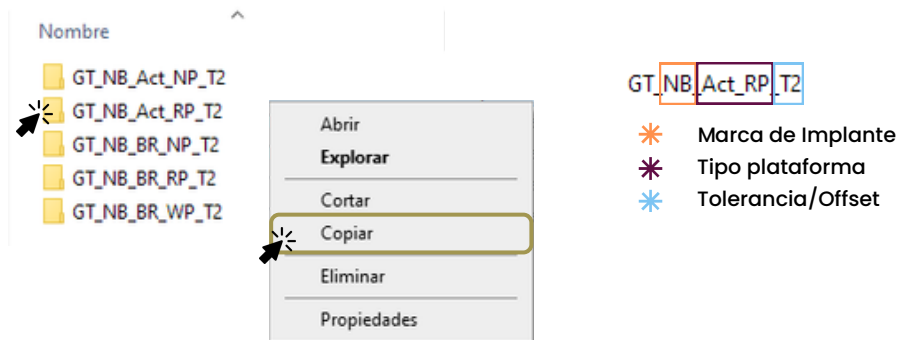


2. DESCARGA E INSTALACION DE LIBRERÍAS

2.1 LIBRERÍA COMPLETA

2.1.2 INSTALACIÓN

5. Pegar la(s) carpeta(s) en la siguiente dirección de Exocad:
"[exocad-DentalCAD3.0/DentalCADApp/Library/Implant](#)"

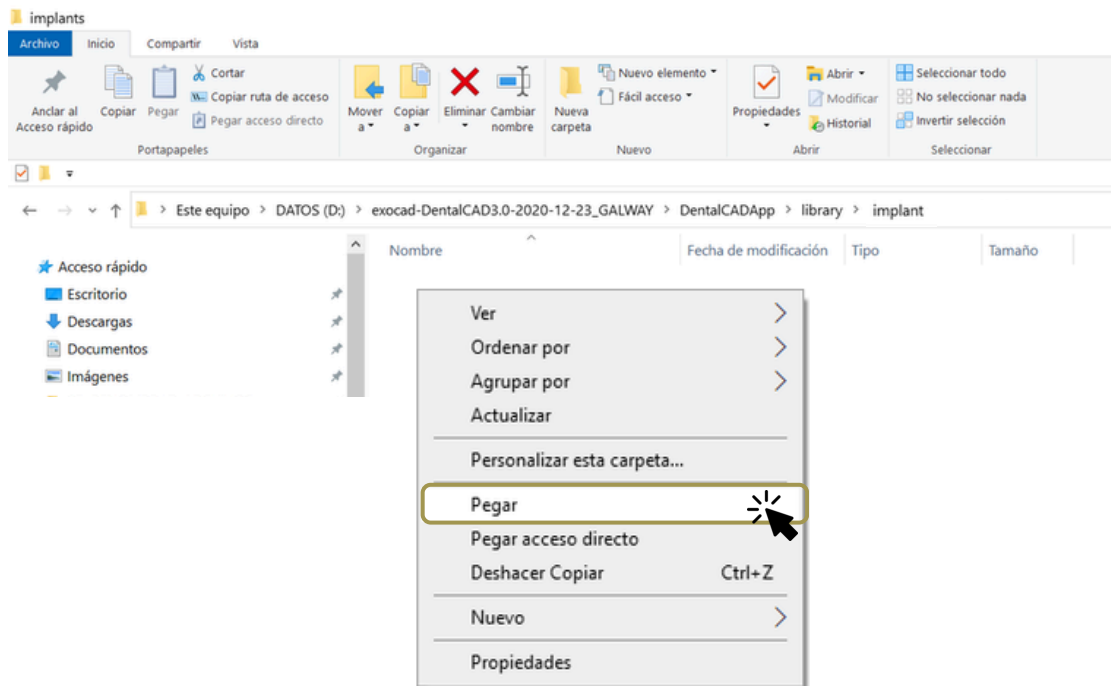


2. DESCARGA E INSTALACION DE LIBRERÍAS


2.2 LIBRERÍA ESPECÍFICA

2.2.1 DESCARGA

- * La descarga individual de librerías por plataforma está disponible únicamente en las fichas de producto de análogos digitales, scan bodies y bases de titanio rectas y anguladas.

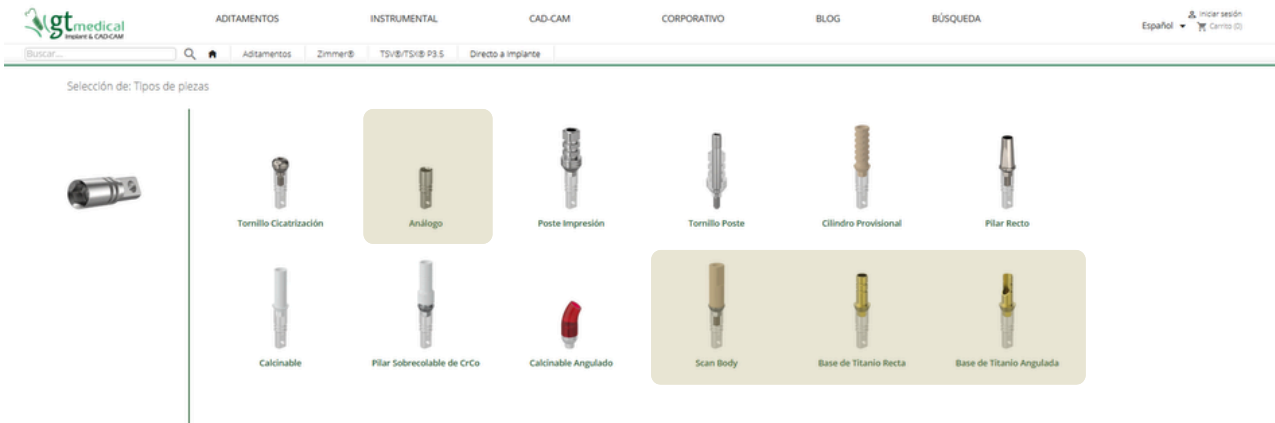

1. Navega por la web, hasta la ficha del producto específico. Desliza hasta la parte inferior de la página, hasta que encuentres la sección de “Librerías CAD/CAM”

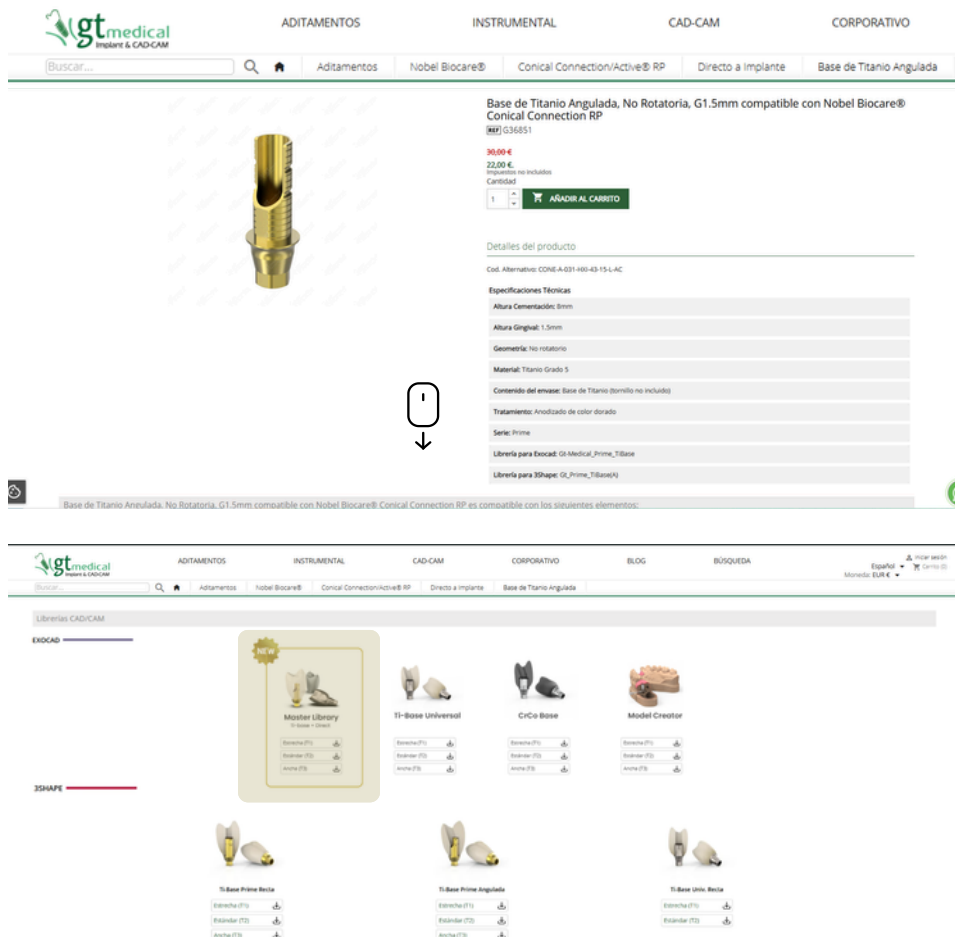


2. DESCARGA E INSTALACION DE LIBRERÍAS

2.2 LIBRERÍA ESPECÍFICA

2.2.1 DESCARGA


2. Seleccionando el tipo de tolerancia que va a utilizar para la restauración, se descarga el archivo específico para la marca, plataforma y tolerancia seleccionadas. En este caso:


Nobel Biocare® Conical Connection/Active® RP → GT_NB_Act_RP_T2.zip

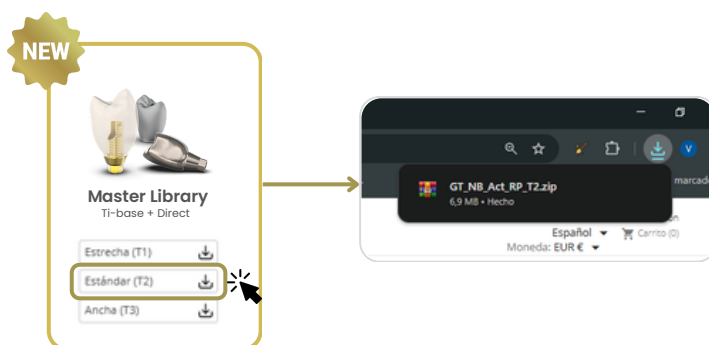


3. Extraer la carpeta de la librería descargada ".zip" - botón dcho. - "Extraer todo..."

Nombre

 GT_NB_Act_RP_T2.zip

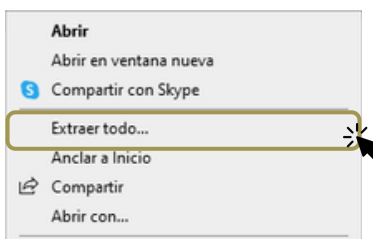

4. Seleccionar un lugar **temporal** para guardar la librería completa. (recomendación: *Escritorio*)


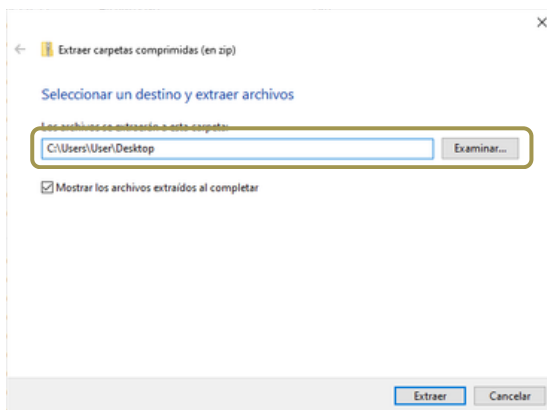


2. DESCARGA E INSTALACION DE LIBRERÍAS


2.2 LIBRERÍA ESPECÍFICA

2.2.2 INSTALACIÓN


1. Copiar la carpeta del "Tipo de plataforma" que se ha descargado y copiala en la siguiente ruta: "exocad-DentalCAD3.0/ DentalCADApp/Library/Implant"

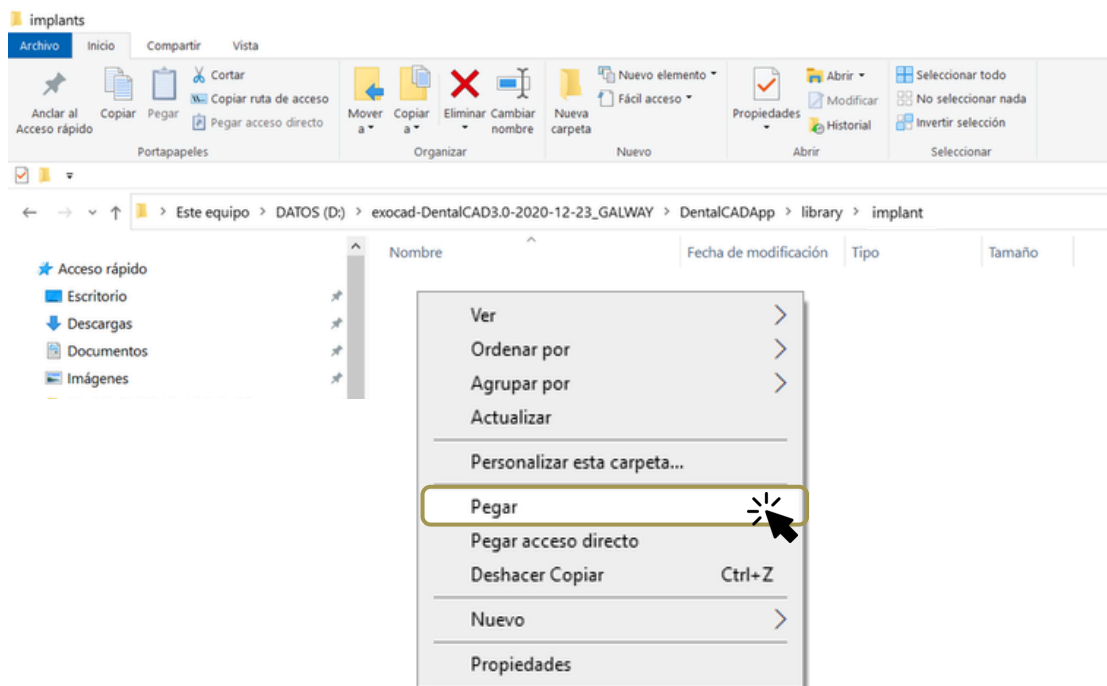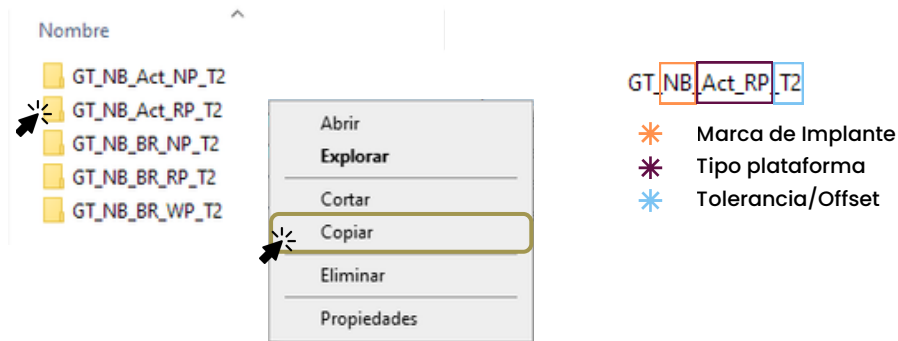

3. SELECCIÓN DE LIBRERÍAS EN EXOCAD

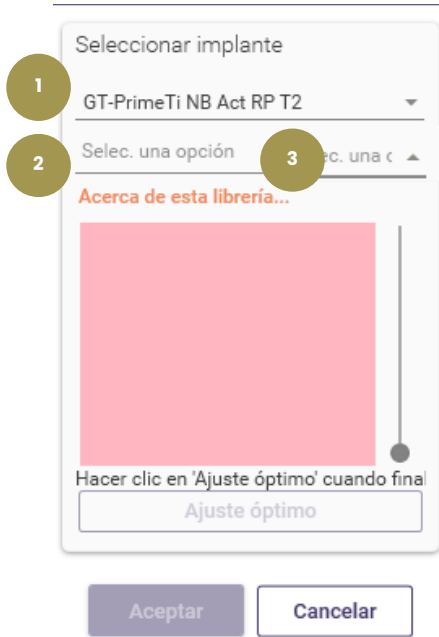


1. Seleccionar la marca de implante, la plataforma y la tolerancia. [Solo elegir si se descarga la librería completa]




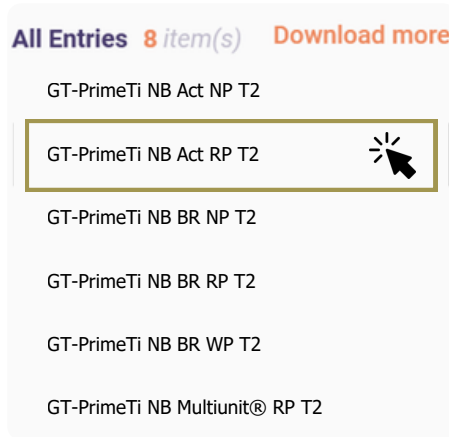


GT-Prime Ti	→	Ti Base Prime
NB	→	Abreviatura marca
Act NP	→	Plataforma
T2	→	Tolerancia

2. Seleccionar si es rotatorio (ROT) o no rotatorio (NoROT) y el tipo de Scanbody utilizado.

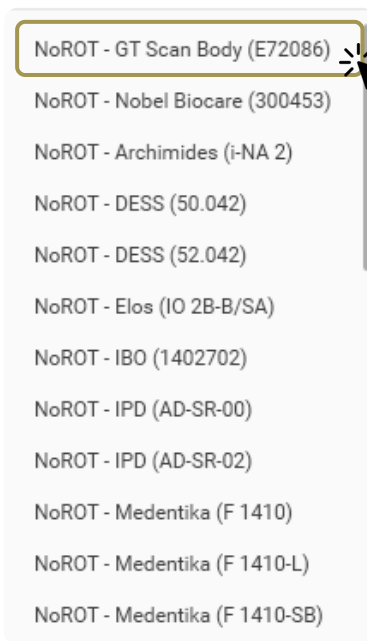

3. Seleccionar la altura gingival (G), la altura de cementación (H) y la angulación (A)

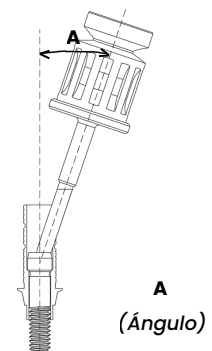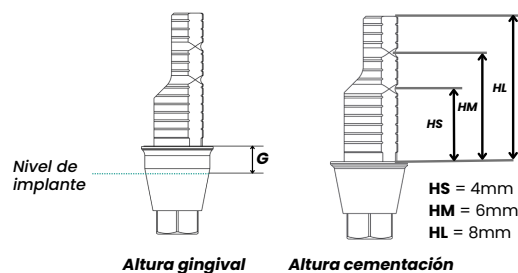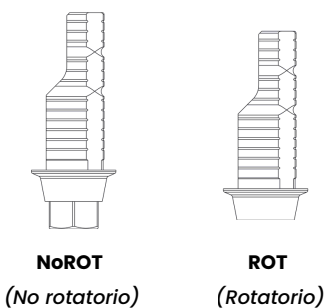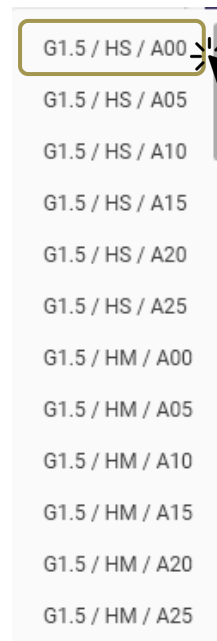

MARCA	IMPLANTE / PLATAFORMA	ABR. PLATAFORMA
Bego Semados®	Internal Ø3.25 / Ø3.75	BS_Int_NP
	Internal Ø4.1	BS_Int_RP
	Internal Ø4.5	BS_Int_WP
BioHorizons®	Tapered Internal P3.0	BI_Tap_30
	Tapered Internal P3.5	BI_Tap_NP
	Tapered Internal P4.5	BI_Tap_RP
Biomet 3i®	Certain® P3.4	3i_Cer_NP
	Certain® P4.1	3i_Cer_RP
	External P4.1	3i_Ext_RP
Bti®	External 4.1	BT_Ext_RP
	Internal 4.1	BT_Int_RP
Dentis®	s-Clean SQ Narrow	Dentis_s-CleanSQNarrow
	s-Clean SQ Regular/Wide	Dentis_s-Clean_SQ_Regular_Wide
	e-Clean Mini	Dentis_e-Clean_Mini
	e-Clean Regular	Dentis_e-Clean_Regular
	e-Clean Wide	Dentis_e-Clean_Wide
	i-Clean Regular	Dentis_i-Clean_Regular
Dentsply®	Astra® 3.0 Yellow	DP_Oss_TP
	Astra® 3.5/4.0 Aqua	DP_Oss_NP
	Astra® 4.5/5.0 Lilac	DP_Oss_RP
	20° Uni Abutment	DP_Oss_Conoco20
Klockner®	Vega® MV Ø3.0	KL_Veg_MV
	Vega® NV Ø3.5	KL_Veg_NV
	Vega® RV Ø4.0 / Ø4.5	KL_Veg_RV
	KL / KL 0.7 NP	KL_KL_NP
	KL / KL 0.7 RP	KL_KL_RP
	KL / KL 0.7 WP	KL_KL_WP
MegaGen®	AnyRidge®	MG_AnyR
	AnyOne® External S	MG_AnyO_ExS
	AnyOne® External R	MG_AnyO_ExR
Mis®	Internal Standard 3.5	MS_Sev_NP
	Seven® Internal Wide ø4.5	MS_Sev_RP
Neodent®	Grand Morse® GM	NE_GM
Nobel Biocare®	Branemark® NP	NB_BR_NP
	Branemark® RP	NB_BR_RP
	Branemark® WP	NB_BR_WP
	Conical Connection NP	NB_Act_NP
	Conical Connection RP	NB_Act_RP
	Multi-Unit® RP Abutment	NB_MU_RP

Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.

MARCA	IMPLANTE / PLATAFORMA	ABR. PLATAFORMA
Phibo®	Aurea® Evo NP	PH_EV_NP
	Aurea® Evo RP	PH_EV_RP
Straumann®	Bone Level NC®	ST_BL_NC
	Bone Level RC®	ST_BL_RC
	RN Synocta®/Octa® Abutment	ST_SYN_RN
	BLX® RB/WB	ST_BLX_RB_WB
	Screw-Retained Abutment Ø 4.6	ST_SRA_46
	Synocta®/Octa® Abutment	ST_SYN_RN
	Tissue Level RN®	ST_TL_RN
Sweden&Martina®	Outlink2® ø3.75 / 4.10	SW_Ext_RP
	Premium® Ø3.30	SW_One_33
	Premium® Ø3.80	SW_One_38
Zimmer®	TSV®/TSX® P3.5	ZM_TSV_NP
	TSV®/TSX® P4.5	ZM_TSV_RP

Todas las marcas comerciales mencionadas son propiedad de sus respectivos titulares.

C
A
D
-
C
A
M

exocad



GUÍA LIBRERÍA

MASTER LIBRARY

rev.: jun/2026